

Calcium Chloride 25mM



Ürün bilgisi

24CaCl01 Coax Calcium Chloride 25mM 10 x 4 mL

Kullanım amacı

Calcium Chloride 25mM tam ve yarı otomatik analizörlerde in vitro Koagülasyon testleri için kullanılır

Özet

Calcium Chloride 25mM koagülasyon testlerinin yeniden kalsifikasyonu için kullanılır.

Reaktifler ve çalışma solüsyonları

Kalsiyum klorür solüsyonu 25mM, 4 mL

Önlemler ve uyarılar

Sağlık meslek mensupları tarafından in vitro diagnostik kullanıma yöneliktir. Tüm laboratuvar reaktiflerinin kullanılmasında gerekli olan normal önlemleri uygulayın.

Enfeksiyöz veya mikrobiyal atık:

Uyarı: atıkları, potansiyel olarak biyolojik olarak tehlikeli madde kabul ederek elleyin. Atıkları, kabul edilen laboratuvar talimatları ve prosedürlerine göre atın.

Çevresel tehlikeler: Güvenli bir şekilde imha edildiğini belirlemek için ilgili tüm yerel imha yönetmeliklerini uygulayın. Talep edildiği takdirde profesyonel kullanıcılara güvenlik veri formu verilebilir. Tüm reaktifler ve numune tiplerinde (örnek, kalibratör ve kontrol) köpük oluşumunu engelleyin.

Reaktif kullanımı

Calcium Chloride 25mM, kullanıma hazır olarak kutulanmıştır.

Saklama ve stabilite

2 8°C'de saklayın. Reaktif, etiket üzerinde belirtilen son kullanma tarihine kadar saklanabilir. Kapak açıldıktan sonra orijinal kabında 2 8°C'de saklandığında 28 gün boyunca kullanılabilir. Dondurmayınız.

Gerekli ancak kutu içinde sağlanmayan malzemeler

1. Genel laboratuvar ekipmanı



Medios Medikal Bilişim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
Güzelevler Mah. Çınar Cad. No: 5 Yüreğir/Adana

